



**OPEN QUICKLY AND EASILY**  
**ABRIR RÁPIDA Y FÁCILMENTE**

Take the envelope with the thumb and the forefinger on the side of the notch. Pull down to open.

*Sujete la envoltura, con el pulgar y el índice, por el lado del corte. Tire hacia abajo para abrirla.*

**1**

**ARMED IN ONE STEP**  
**ARMADO EN UN PASO**

Pull back the top panel for easy access into the carrier.

*Retire la cubierta superior para un fácil acceso al envase*

**2**

**EASY SUPPLY**  
**SUMINISTRO FÁCIL**

Take the suture and turn down the point of the needle, extend slowly in a straight line.

*Tome la sutura y voltee la punta de la aguja hacia abajo, extienda lentamente en línea recta*

**3**

**MINIMIZE MEMORY OF THE SUTURE**  
**MINIMIZA LA MEMORIA DE LA SUTURA**

The envelope reduces the memory of the suture for easy use by the surgeon or nurse.

*La envoltura reduce la memoria de sutura al mínimo, para un fácil manejo del cirujano o enfermera*

**4**